

Aanlegadvies

Absorin Comfort T-Fit



Juist aanleggen

Het juist aanleggen van Absorin Comfort T-Fit bevordert de absorptie en voorkomt lekkage.

Verband verzadigd

Via de urineverzadigingsindicator op de buitenzijde van Absorin Comfort T-Fit kunt u controleren of het product verzadigd is. Wanneer de indicator van kleur verandert, is het noodzakelijk het verband te verwisselen. Ontstaat er lekkage voordat de indicator vervaagd is, controleer dan of Absorin Comfort T-Fit juist is aangelegd.

Ontlastingsverlies

Bij ontlastingsverlies verwisselt u Absorin Comfort T-Fit direct. Ontlasting wordt namelijk niet opgenomen door het

absorberende gedeelte van het verband, met als mogelijk gevolg huidirritatie.

Schoon en droog

Zorg dat de huid goed schoon en droog is. Gebruik geen zeep maar alleen water of een zeepvrije, huid pH-neutrale waslotion (bijvoorbeeld Klinion Personal Care Wash Lotion). U kunt de huid beschermen met Klinion Personal Care Barrier Cream.

Verwijderen

Verwijder in verband met de hygiëne het verband van voren naar achteren.

Aanleggen Absorin Comfort T-Fit - staand

1. Vouw Absorin Comfort T-Fit open. Haal de uiteinden van de twee heupbanden los van de achterzijde van het verband.



2. Vouw Absorin Comfort T-Fit in de lengte goed dubbel waardoor er een komvorm ontstaat en de antilekrandjes omhoog gaan staan. Een belangrijke stap die niet overgeslagen mag worden.



3. Bevestig de heupband om uw heupen en sluit de band op uw buik. De bovenrand van de absorberende kern bevindt zich iets boven de bilnaad. Bevestig de heupbanden door de band iets aan te trekken, zodat de haakjes van het klittenband in de heupband kunnen 'grijpen'. Zorg dat Absorin Comfort T-Fit goed in het midden zit.



4. Haal Absorin Comfort T-Fit dubbelgevouwen met een zigzaggende beweging met twee handen tussen de benen door naar voren. Zorg dat Absorin Comfort T-Fit goed aansluit in de liezen.



5. Vouw de voorkant van Absorin Comfort T-Fit uit en bevestig de voorkant van het verband op de heupband terwijl u het elastiek uitrekt. Hierdoor 'grijpt' het klittenband in de heupband en bent u verzekerd van een optimale fixatie. Haal zo nodig met de vingers liesplooien buiten het verband.



Aanleggen Absorin Comfort T-Fit - liggend

1. Vouw Absorin Comfort T-Fit open. Haal de uiteinden van de twee heupbanden los van de achterzijde van het verband. 
2. Vouw Absorin Comfort T-Fit in de lengte goed dubbel waardoor er een komvorm ontstaat en de antilekrandjes omhoog gaan staan. Een belangrijke stap die niet overgeslagen mag worden. 
3. Draai op uw zij. Leg Absorin Comfort T-Fit zo achter u neer dat het absorberende gedeelte precies in het midden zit. De bovenrand van de absorberende kern bevindt zich iets boven de bilnaad. Schuif de heupband alvast iets onder uw lichaam. 
4. Draai op uw andere zij, haal de heupband onder uw lichaam vandaan. Bevestig de heupbanden om de heupen door de band iets aan te trekken, zodat het klittenband in de heupband kan 'grijpen'. 
5. Haal Absorin Comfort T-Fit gevouwen met een zigzaggende beweging met twee handen tussen de benen door naar voren. Zorg dat Absorin Comfort T-Fit goed aansluit in de liezen. U kunt het klittenband van de Absorin Comfort T-Fit meerdere keren losmaken en opnieuw bevestigen. (Bijvoorbeeld als u naar het toilet gaat.) 
6. Bevestig de voorkant van Absorin Comfort T-Fit op de heupband terwijl u het elastiek uitrekt. Hierdoor 'grijpt' het klittenband in de heupband en bent u verzekerd van een optimale fixatie. Haal zo nodig met de vingers liesplooiën buiten het verband. 

U kunt het klittenband van Absorin Comfort T-Fit meerdere keren losmaken en opnieuw bevestigen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het gebruik van de Absorin Comfort-producten of een deskundig advies? Neem dan contact op met onze afdeling Customer Service via telefoonnummer (0186) 63 44 00.

Voor de consument is er 2 maal per dag een telefonisch spreekuur met onze verpleegkundig adviseurs van 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur. U kunt een telefonisch verzoek indienen bij onze receptie via het gratis telefoonnummer 0800-0228 282 of een e-mail sturen naar informatielijn@medeco.nl.



Absorin Comfort® is een merk van Medeco B.V.
Alexander Flemingstraat, 3261 MA Oud-Beijerland
T (0186) 63 44 00, F (0186) 61 68 93
info@medeco.nl, www.medeco.nl,
www.catalogus.medeco.nl

F111036-03 | Druk- en zetfouten voorbehouden. Medeco behoudt zich, te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.