

Aanlegadvies

Absorin Comfort Sanette



Het is noodzakelijk Absorin Comfort Sanette te fixeren met goed aansluitend ondergoed of met een speciaal fixatiebroekje zoals de Fix, zodat het product goed op het lichaam aansluit.

Juist aanleggen

Het juist aanleggen van Absorin Comfort Sanette bevordert de absorptie en voorkomt lekkage.

Verband verzadigd

Via de urineverzadigingsindicator op de buitenzijde van Absorin Comfort Sanette kunt u controleren of het product verzadigd is. Wanneer de indicator van kleur verandert, is het noodzakelijk het verband te verwisselen. Ontstaat er lekkage voordat de indicator vervaagd is, controleer dan of Absorin Comfort Sanette juist is aangelegd.

Ontlastingsverlies

Bij ontlastingsverlies verwisselt u Absorin Comfort Sanette direct, ontlasting wordt namelijk niet opgenomen door het absorberende gedeelte van het verband met als mogelijk gevolg huidirritatie.

Schoon en droog


Zorg dat de huid goed schoon en droog is. Gebruik geen zeep maar alleen water of een zeepvrije, huid pH-neutrale waslotion (bijvoorbeeld Klinion Personal Care Wash Lotion). U kunt de huid beschermen met Klinion Personal Care Barrier Cream.

Verwijderen

Verwijder in verband met de hygiëne het verband van voren naar achteren.

Aanleggen Absorin Comfort Sanette - staand

1. Trek het fixatiebroekje aan (met de naden naar buiten) en trek het kruis op tot aan de bovenkant van het bovenbeen. Sla de bovenkant van het broekje terug tot halverwege het bovenbeen.

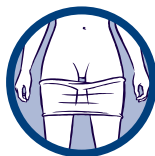

2. Vouw Absorin Comfort Sanette open en vouw het product goed dubbel over de lengte, zodat er een komvorm ontstaat en de antilekrandjes omhoog gaan staan. Een belangrijke stap die niet overgeslagen mag worden.



3. Trek Absorin Comfort Sanette van voor naar achter aan, waarbij de grote boog achter hoort. Let op dat Absorin Comfort Sanette netjes in het midden zit.



4. Trek eerst de achterkant van het fixatiebroekje omhoog en vouw Absorin Comfort Sanette plat over de billen uit, de bovenkant van de absorberende kern hoort net iets boven de bilnaad uit te komen.



5. Haal met een zigzaggende beweging met twee handen de voorkant van Absorin Comfort Sanette naar voren, zodat het product goed aansluit in de liezen. Vouw de voorkant plat op uw buik, de voorkant van Absorin Comfort Sanette zit dan ongeveer halverwege het kruis en de navel.



6. Trek de voorkant van het fixatiebroekje omhoog en zorg ervoor dat het broekje goed aansluit in de liezen. Haal zo nodig met de vingers liesplooien buiten het fixatiebroekje.



Aanleggen Absorin Comfort Sanette - liggend

1. Trek het fixatiebroekje aan (met de naden naar buiten) en trek het kruis op tot aan de bovenkant van het bovenbeen. Ga op uw zij liggen, houd uw bovenliggende been gebogen. Haal het fixatiebroekje aan de bovenliggende zijde naar beneden en trek het zo mogelijk om de knie heen.



2. Vouw Absorin Comfort Sanette open en vouw het product goed dubbel over de lengte, zodat er een komvorm ontstaat en de antilekrandjes omhoog gaan staan. Een belangrijke stap die niet overgeslagen mag worden.



3. Doe Absorin Comfort Sanette van voor naar achter aan, waarbij de grote boog achter hoort. Let op dat Absorin Comfort Sanette netjes in het midden zit.



4. Trek eerst de achterkant van het fixatiebroekje omhoog en vouw Absorin Comfort Sanette plat over de billen uit, de bovenkant van het absorberende gedeelte hoort net iets boven de bilnaad uit te komen.



5. Rol terug op uw rug. Controleer aan uw andere zijde of het fixatiebroekje goed omhoog is getrokken en Absorin Comfort Sanette plat over de billen is uitgevouwen.



6. Haal met een zigzaggende beweging met twee handen de voorkant van Absorin Comfort Sanette naar voren, zodat het product goed aansluit in de liezen. Vouw de voorkant plat op uw buik. De voorkant van het product zit dan ongeveer halverwege het kruis en de navel.



7. Trek de voorkant van het fixatiebroekje omhoog. Zorg ervoor dat het broekje goed aansluit in de liezen. Haal zo nodig met de vingers liesplooien buiten het fixatiebroekje.



Meer informatie?

Wilt u meer weten over het gebruik van de Absorin Comfort-producten of een deskundig advies? Neem dan contact op met onze afdeling Customer Service via telefoonnummer (0186) 63 44 00.

Voor de consument is er 2 maal per dag een telefonisch spreekuur met onze verpleegkundig adviseurs van 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur. U kunt een telefonisch verzoek indienen bij onze receptie via het gratis telefoonnummer 0800-0228 282 of een e-mail sturen naar informatielijn@medeco.nl.



Absorin Comfort[®] is een merk van Medeco B.V.
Alexander Flemingstraat, 3261 MA Oud-Beijerland
T (0186) 63 44 00, F (0186) 61 68 93
info@medeco.nl, www.medeco.nl,
www.catalogus.medeco.nl

F111038-03 | Druk- en zetfouten voorbehouden. Medeco behoudt zich, te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.