

Prikken met 1 klik, wat is het geheim?



Aanspannen en
prikken in **1 klik**

Het cijfer in het
venster geeft het
aantal resterende
lancetten aan

Hendeltje om
eenvoudig een
nieuw lancet te
verkrijgen

11 standen
voor iedere
huiddikte

3 • 2 • 1

Zes lancetten in
een houder. **Geen**
losse lancetten

Ga voor meer informatie naar www.accu-check.nl
of bel 0800 - 022 05 85 (gratis).

ACCU-CHEK, FASTCLIX en CLIXMOTION zijn handelsmerken van Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Alle rechten voorbehouden.

www.accu-check.nl

Roche Diabetes Care
Postbus 1450
1300 BL Almere



ACCU-CHEK®



Accu-Chek® FastClix

1 klik, dat is alles. De prikken
die werkt met slechts 1 klik.



ACCU-CHEK®

Eenvoudig, zacht en uniek. Accu-Chek® FastClix, prikken met 1 klik

Prikken maakt onderdeel uit van de controle van je bloedglucose. Het gebruiken van prikpenen en het prikken van een bloeddruppel kan ingewikkeld en soms pijnlijk zijn.


De Accu-Chek® FastClix prikpen is de prikpen die werkt met slechts 1 klik. De unieke technologie maakt snel, eenvoudig en vrijwel pijnloos prikken mogelijk.



- **Eenvoudig:** lancet aanspannen en prikken in 1 klik - eenvoudig in gebruik
- **Zacht:** Clixmotion® technologie met elf verschillende diepte-instellingen - vrijwel pijnloos.
- **Uniek:** zes lancetten in een houder; lancetten zijn niet zichtbaar en aanraken van lancetten is niet nodig - makkelijk en veilig

Clixmotion technologie voor minder pijnlijk prikken

- Met gepatenteerde technologie die het lancet vanuit twee richtingen stuurt.
- Zorgt voor een soepele beweging van het lancet.
- Lancet heeft een smaller wordend, drievlaks geslepen naaldpunt voor verminderde pijn en een soepele doordringing van de huid.

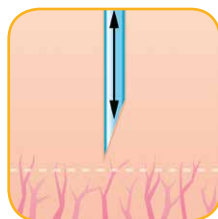

Met Clixmotion

- Minimale trillingen - zowel in als uit de huid
- Lancet stopt snel en wordt onmiddellijk teruggetrokken



Zonder Clixmotion

- Trillingen veroorzaken pijnlijke weefselschade
- Lancet stopt abrupt en stuitert terug



Aanspannen en prikken in 1 klik

Door het 1-kliksysteem kun je het lancet aanspannen en prikken in één eenvoudige handeling. Prikken wordt hiermee sneller en gemakkelijker doordat er minder stappen nodig zijn. Was en droog altijd je handen voor het prikken.



Aanspannen en prikken in 1 klik



Beweeg het hendeltje heen en weer voor een nieuw lancet

De slimme keuze

De Accu-Chek® FastClix prikpen met zes lancetten in een houder zorgt ervoor dat je lancetten snel kunt plaatsen en verwisselen - en zonder de lancetten aan te hoeven raken.



Ongebruikte lancethouder

- Zes lancetten in een houder
- Lancetten zijn niet zichtbaar
- Aanraken van lancetten niet nodig
- Geen naaldencontainer nodig; lancetten worden veilig bewaard in de houder