

Aanspannen en prikken in 1 klik



1
Prikdiepte instellen
Draai de instelling voor de juiste prikdiepte



2
Bloeddruppel verkrijgen
Aanspannen en prikken in 1 klik



3
Lancet vervangen
Beweeg het hendeltje heen en weer voor een nieuw lancet

Lancethouder vervangen



1
Verwijder de dop



2
Plaats de lancethouder




3
Doe de dop weer op de pen




Ongebruikte lancethouder Gebruikte lancethouder

Vervang de houder nadat je het laatste lancet hebt gebruikt. De lancethouder kan niet worden herplaatst

Clixmotion® technologie voor minder pijnlijk prikken

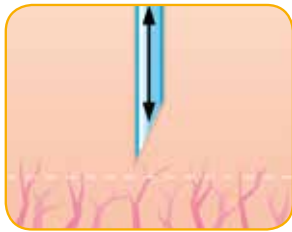

Met Clixmotion

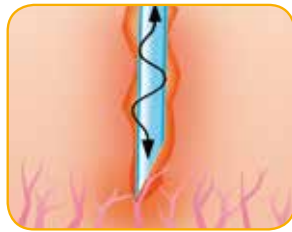

Zonder Clixmotion



- Met gepatenteerde technologie die het lancet vanuit twee richtingen stuurt.
- Zorgt voor een soepele beweging van het lancet.
- Lancet heeft een smaller wordend, drievlaks geslepen naaldpunt voor verminderde pijn en een soepele doordringing van de huid.

11 standen voor iedere huiddikte

Het cijfer in het venster geeft het aantal resterende lancetten aan

Aanspannen en prikken in **1 klik**

Hendeltje om eenvoudig een nieuw lancet te verkrijgen

Zes lancetten in een houder. **Geen** losse lancetten

De Accu-Chek FastClix is bedoeld voor gebruik bij zelfcontrole door één persoon. De prikken mag niet worden gebruikt voor het afnemen van bloed bij verschillende personen, omdat hiervoor geen speciale voorzieningen ter voorkoming van infectiegevaar getroffen zijn.