



Gaat 'pancaking' tegen  
Neutraliseert onaangename geuren  
Geen last van vacuüm trekken

## **Productomschrijving**

Ontlasting kan bovenin het stomazakje blijven hangen en ophopen voor de ingang van de stoma.  
Dit verschijnsel wordt ook wel 'pancaking' genoemd. Met behulp van APzyme kan dit voorkomen worden.

APzyme is een gel, die aan de binnenkant van het stomazakje gesmeerd dient te worden. De gel maakt het materiaal aan de binnenkant van het stomazakje veel gladder, waardoor ontlasting gemakkelijker naar beneden verplaatst.

## Gebruiksaanwijzing

1. Open een sachet (zie foto 1).
2. Doe de inhoud van een sachet APzyme in een schoon stomazakje (zie foto 2).
3. Smeer APzyme aan de binnenkant van het stomazakje goed in. Vermijd daarbij klontvorming. (Tip gebruik bijv. een wattenstaafje om de gel goed uit te smeren. Let op: smeer alleen de bovenkant van het zakje in.) (zie foto 3).
4. Plak het stomazakje op als gebruikelijk.

Let op! Niet geschikt voor consumptie.

Foto 1



Foto 2



Foto 3



<b>Product</b>	<b>APzyme</b>
Inhoud	40 stuks
Artikelcode	APG40