

# Actico<sup>®</sup> UlcerSys **NIEUW** Compressiekoussysteem



Actico UlcerSys is een uit twee lagen bestaand compressiekoussysteem dat vooral kan worden gebruikt voor het behandelen van ulcus cruris venosum en het voorkomen van recidieven daarvan. Tijdens de initiële acute behandelfase worden

korte-rekverbanden gebruikt, terwijl Actico UlcerSys in de acute fase ná vermindering van het oedeem en in de onderhoudsfase over de behandelde wond gebruikt kan worden.

## Toepassingsgebied

- voor het behandelen van ulcus cruris venosum ('open been') na oedeemvermindering
- als preventie van een recidiverend chronisch open been
- bij huidontsteking met stuwing zoals eczeem, pigmentatie, lipodermatosclerose, atrophie blanche
- bij veneus oedeem
- voor het behandelen van een posttrombotisch syndroom
- voor de nabehandeling bij sclerotherapie en varicesoperaties
- na het uitnemen van een ader voor een bypassoperatie (hartoperatie)

## Eigenschappen

Onderkous:

- 70% polyamide, 30% Lycra<sup>®</sup>
- 10–14 mmHg

Bovenkous:

- 65% polyamide, 35% Lycra<sup>®</sup>
- 26–34 mmHg

## Lengte

- Kous voor het onderbeen
- Twee lengtes: standaard en lang

## Details

Verkrijgbaar in twee kleurcombinaties:

- 1 bovenkous (B) beige + 2 onderkousen (O) wit
- 1 bovenkous (B) zwart + 2 onderkousen (O) beige

### Zo comfortabel: de onderkous.




### Zo betrouwbaar: de bovenkous.



### Zo meet u goed:

- **Meetpunt cC:** de breedste omtrek van het onderbeen
- **Meetpunt cB:** 2-3 cm boven de enkel

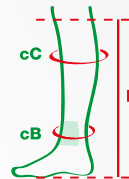

- **Lengtemaat ID:** 2-3 cm onder de knieholte tot de grond

## Actico® UlcerSys Compressiekoussysteem NIEUW

| Kleur B / O* | Lengte    | Maat | Enkelomvang cB (cm) | Kuitomvang cC (cm) | Beenlengte ID (cm) | REF    | ZI       | CNK      | Verpakking (stuks) |
|--------------|-----------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------|----------|----------|--------------------|
| Standaard    | Standaard | S    | 19-21               | 31-39              | 38-42              | 32 510 | 16542223 | 3553-781 | 1/16               |
|              |           | M    | 21-23,5             | 33-41              | 38-42              | 32 512 | 16542258 | 3553-807 | 1/16               |
|              |           | L    | 23-27               | 35-44              | 38-42              | 32 514 | 16542274 | 3553-823 | 1/16               |
|              |           | XL   | 27-32               | 39-48              | 38-42              | 32 516 | 16542290 | 3553-849 | 1/16               |
|              |           | XXL  | 32-37               | 43-52              | 38-42              | 32 518 | 16542312 | 3553-864 | 1/16               |
|              | Lang      | S    | 19-21               | 31-39              | > 42               | 32 511 | 16542231 | 3553-799 | 1/16               |
|              |           | M    | 21-23,5             | 33-41              | > 42               | 32 513 | 16542266 | 3553-815 | 1/16               |
|              |           | L    | 23-27               | 35-44              | > 42               | 32 515 | 16542282 | 3553-831 | 1/16               |
|              |           | XL   | 27-32               | 39-48              | > 42               | 32 517 | 16542304 | 3553-856 | 1/16               |
|              |           | XXL  | 32-37               | 43-52              | > 42               | 32 519 | 16542320 | 3553-872 | 1/16               |
| Lang         | Standaard | S    | 19-21               | 31-39              | 38-42              | 39 710 | 16542452 | 3553-880 | 1/16               |
|              |           | M    | 21-23,5             | 33-41              | 38-42              | 39 712 | 16542479 | 3553-906 | 1/16               |
|              |           | L    | 23-27               | 35-44              | 38-42              | 39 714 | 16542495 | 3553-922 | 1/16               |
|              |           | XL   | 27-32               | 39-48              | 38-42              | 39 716 | 16542517 | 3553-948 | 1/16               |
|              |           | XXL  | 32-37               | 43-52              | 38-42              | 39 718 | 16542533 | 3553-963 | 1/16               |
|              | Lang      | S    | 19-21               | 31-39              | > 42               | 39 711 | 16542460 | 3553-898 | 1/16               |
|              |           | M    | 21-23,5             | 33-41              | > 42               | 39 713 | 16542487 | 3553-914 | 1/16               |
|              |           | L    | 23-27               | 35-44              | > 42               | 39 715 | 16542509 | 3553-930 | 1/16               |
|              |           | XL   | 27-32               | 39-48              | > 42               | 39 717 | 16542525 | 3553-955 | 1/16               |
|              |           | XXL  | 32-37               | 43-52              | > 42               | 39 719 | 16542541 | 3553-971 | 1/16               |

\* B = Bovenkous, O = Onderkous