

Actico[®] UlcerSys **NIEUW** Onderkous



De Actico UlcerSys-onderkous maakt deel uit van het Actico UlcerSys-compressiekoussysteem voor het behandelen van ulcus cruris venosum en het voorkomen van recidieven daarvan. De aangenaam comfortable onderkous kan ook op zichzelf worden gebruikt als alleen lichte compressie noodzakelijk is. De onderkous bouwt een druk op van 10–14 mmHg, behandelt het been met het therapeutisch benodigde

drukverloop en kan dag en nacht worden gedragen. De onderkous is huidvriendelijk en wordt direct over het wondverband aangetrokken. Als het aantrekken van het uit twee lagen bestaande compressiekoussysteem niet mogelijk is, kunnen de onderkousen ook in maximaal twee of drie lagen over elkaar worden gedragen om toch de benodigde druk te bereiken.

Toepassingsgebied

- voor het behandelen van ulcus cruris venosum ('open been') na oedeemvermindering
- als preventie van een recidiverend chronisch open been
- bij huidontsteking met stuwing zoals eczeem, pigmentatie, lipodermatosclerose, atrophie blanche
- bij veneus oedeem
- voor het behandelen van een posttrombotisch syndroom
- voor de nabehandeling bij sclerotherapie en varicesoperaties
- na het uitnemen van een ader voor een bypassoperatie (hartoperatie)

Eigenschappen

- 70% polyamide, 30% Lycra[®]
- 10–14 mmHg

Lengte

- Kous voor het onderbeen
- Twee lengtes: standaard en lang

Details

Set van drie, verkrijgbaar in twee kleuren:

- wit
- beige

Zo comfortabel: de onderkous.



twee tot drie lagen over elkaar draagbaar

- 1 laag ~ 12 mmHg
- 2 lagen ~ 24 mmHg
- 3 lagen ~ 36 mmHg



fixeert wondverbanden

plat boordje blijft goed op zijn plaats zitten

de speciale tricotconstructie ('inlay-yarn') zorgt voor een altijd goede pasvorm


platte naad bij de tenen voor een uitstekend draagcomfort

verstevigde hielconstructie



Zo meet u goed:

- **Meetpunt cC:** de grootste omvang van de kuit
- **Meetpunt cB:** 2-3 cm boven de enkel

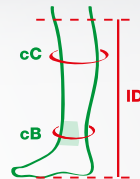

- **Lengtemaat ID:** 2-3 cm onder de knieholte op de grond

Actico® UlcerSys Onderkous NIEUW

Kleur	Lengte	Maat	Enkelomvang cB (cm)	Kuitomvang cC (cm)	Beenlengte ID (cm)	REF	ZI	CNK	Verpakking (stuks)
	Standaard	S	19-21	31-39	38-42	32 530	16542339	3552-817	3/150
		M	21-23,5	33-41	38-42	32 532	16541472	3552-833	3/150
		L	23-27	35-44	38-42	32 534	16542371	3552-858	3/150
		XL	27-32	39-48	38-42	32 536	16542401	3552-874	3/150
		XXL	32-37	43-52	38-42	32 538	16542436	3552-890	3/150
	Lang	S	19-21	31-39	> 42	32 531	16542347	3552-825	3/150
		M	21-23,5	33-41	> 42	32 533	16542363	3552-841	3/150
		L	23-27	35-44	> 42	32 535	16542398	3552-866	3/150
		XL	27-32	39-48	> 42	32 537	16542428	3552-882	3/150
		XXL	32-37	43-52	> 42	32 539	16542444	3552-908	3/150
	Standaard	S	19-21	31-39	38-42	39 740	16542568	3552-916	3/150
		M	21-23,5	33-41	38-42	39 742	16542584	3552-932	3/150
		L	23-27	35-44	38-42	39 744	16542606	3552-957	3/150
		XL	27-32	39-48	38-42	39 746	16542622	3552-973	3/150
		XXL	32-37	43-52	38-42	39 748	16541766	3552-999	3/150
	Lang	S	19-21	31-39	> 42	39 741	16542576	3552-924	3/150
		M	21-23,5	33-41	> 42	39 743	16542592	3552-940	3/150
		L	23-27	35-44	> 42	39 745	16542614	3552-965	3/150
		XL	27-32	39-48	> 42	39 747	16542630	3552-981	3/150
		XXL	32-37	43-52	> 42	39 749	16542657	3552-005	3/150