



met Comfortabele Kleeflaag Technologie

AANBRENGTECHNIEK 1685 VOOR ALLE CVK'S, ARTERIEEL, DIALYSE



1
Desinfecteer zorgvuldig uw handen. Trek steriele handschoenen aan. Desinfecteer huid van de patiënt volgens protocol en laat desinfectans volledig drogen. Open verpakking en haal steriele film eruit.



2
Verwijder het schutblad aan de achterkant en houd de film met twee handen aan de handige tabs ('oren') vast.



3
Plaats de non-woven stabilisatierand met inkeping tot over de katheterhub en -vleugels en leg de non-woven filmmuiteinden onder de katheterlijn(en) tegen elkaar aan.



4
Druk de film voorzichtig maar stevig aan van binnen naar buiten, rondom insteekopening en katheterhub. Til voorzichtig de katheterlumen op om de non-woven fixatierand stevig op de huid aan te drukken.



5
Verwijder langzaam frame in twee delen. (één met brede fixatiestrip en één deel met smalle fixatiestrip). Druk tegelijkertijd stevig randen van de film aan voor goed contact van kleeflaag op de huid: de optimale kleefkracht.



6
Verwijder brede strip met inkeping van papieren frame. Laat 2 hoekjes zitten, pak hieraan vast. (Geen aanraking kleeflaag.) Vouw strip dubbel, druk vouw op huid onder hub aan; wrijf dan 1 voor 1 helft van strip van midden naar buiten toe uit. Inkeping strip wijst richting insteekopening!



7
Hele strip is onder hub. Inkeping zit contra inkeping filmverband (sluit zich als één geheel rondom katherhub voor optimale stabilisatie). Verwijder dan papieren hoekjes van strip door deze hoekjes van binnen naar buiten weg te "duwen".



8
Schrijf datum en tijdstip op de smalle strip, het documentatielabel, en plaats deze over de katheterhub voor extra fixatie.



9
Druk het gehele verband stevig aan voor optimale kleefkracht.

VERWIJDERTECHNIEK 1685 ALLE CVK'S ARTERIEEL, DIALYSE



1
Verwijder alle fixatiestrips van het verband. Makkelijk is de strips vanuit de rand vast te pakken en los te maken.

3M

3M Nederland B.V.
Afd. Health Care

Postbus 193, 2300 AD Leiden
Postbus 1002, 2600 BA Delft (niv 23/8/14)
www.3m.nl/gezondheidszorg



2
Pak non-woven filmmuiteinden, rol als het ware op (laag, langzaam) richting transparante deel, houdt één vinger op katheterhub zodat deze niet weg schuift.

3M Belgium bvba/sprl
Health Care

Hermeslaan 7, 1831 Diegem
Tel: (02) 722 5351 – fax: (02) 722 5022
www.3m.be/healthcare



3
Maak voorzichtig het transparante gedeelte los van de huid en insteekopening. Ondersteun daarbij de insteekopening met één vinger zodat de lijn in situ blijft.

3M, Tegaderm zijn trademarks van 3M
© 3M 2014. Alle rechten voorbehouden.