



met Comfortabele Kleeflaag Technologie

AANBRENGTECHNIEK 1681 VOOR PERIFERE LIJNEN



1

Desinfecteer zorgvuldig uw handen en de huid van de patiënt volgens protocol. Laat alle desinfectans volledig drogen. Open de verpakking en haal de steriele film eruit.



2

Verwijder de steriele pleisterstrips.



3

Breng de steriele pleisterstrips op de vleugels van de katheter aan.



4

Verwijder het schutblad aan de achterkant.



5

Houd de film met twee handen aan de handige tabs ('oren') vast en plaats de film over de insteekopening. Buig hierbij de duim licht om goed te fixeren.



6

Plaats de filmuiteinden kruislings onder de venflon en druk deze zachtjes aan.



7

Verwijder het papieren frame en loop de randen van de film voorzichtig na. Indien gewenst kunnen de steriele pleisterstrips ook nu pas ingezet worden om de infuuslijn te fixeren.



8

Druk het geheel nogmaals stevig aan en plaats eventueel de data strip om datum en tijdstip van aanbrengen vast te leggen.

VERWIJDERTECHNIEK 1681 VOOR PERIFERE LIJNEN



1

Pak voorzichtig de non-woven filmuiteinden vast en trek deze los van de huid in de richting van de insteekopening.



2

Trek langzaam het verband over elkaar weg en houd het dicht bij de huid. Rol het als het ware op. Stabiliseer met de andere hand de katheter' en ondersteun de huid.